

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Crème : Tube de 100 g, tube de 25 g, flacon pressurisé de 100 g.
Compresse imprégnée stérile : Boîte de 10 ou de 3 (10 cm x 10 cm).

COMPOSITION

ialuset® crème : Acide Hyaluronique (sel sodique) (0,2 %),
autres composants : cetearyl glucoside, decylester d'acide oléique, alcool cétéarylique et sodiumlauryl sulfate et sodium cétéaryl sulfate, glycérol, sorbitol liquide, acide sorbique, methyl et propyl parahydroxybenzoate, citrate de sodium dihydrate, eau.

ialuset® compresse stérile : Compresse stérile imprégnée de crème d'acide hyaluronique (sel sodique) (0,05%), autres composants : macrogol, glycérol, eau.

PROPRIÉTÉS

L'acide hyaluronique est le composant principal de la substance fondamentale du derme. Il agit à toutes les phases du processus de cicatrisation. Il accélère la cicatrisation et la réépithélialisation des lésions cutanées.

Son pouvoir hygroscopique maintient un environnement humide favorable au processus de régénération tissulaire.

L'acide hyaluronique utilisé est obtenu par biofermentation.

INDICATIONS

Cicatrisant dans le traitement des plaies non infectées, suintantes ou surinfectées, dont les ulcères de jambe.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Crème : Après avoir effectué les soins de nettoyage habituels, appliquer la crème directement sur la plaie en couche de 2 à 3 mm d'épaisseur environ ou bien déposer la crème sur une gaze stérile que l'on applique ensuite sur la plaie.

Le pansement peut être maintenu à l'aide d'un bandage approprié.

Avant de renouveler les applications, il est recommandé de nettoyer la plaie au sérum physiologique. La fréquence de renouvellement est de 1 application par jour de la phase de bourgeonnement jusqu'à complète cicatrisation.

La crème peut être éliminée par simple lavage.

L'évolution de la cicatrisation de votre plaie reste à l'entière appréciation de votre médecin.

Compresse imprégnée stérile : Après avoir retiré les 2 films protecteurs, la compresse est appliquée sur la plaie préalablement nettoyée et désinfectée. La compresse est ensuite recouverte d'une gaze stérile puis d'une ouate. L'ensemble du pansement est maintenu à l'aide d'un bandage approprié.

En cas de légère adhérence du pansement sur la plaie, bien rincer au sérum physiologique.

Avant de renouveler les applications, il est recommandé de nettoyer la plaie au sérum physiologique. La fréquence de renouvellement est de 1 application par jour de la phase de bourgeonnement jusqu'à complète cicatrisation.

L'évolution de la cicatrisation de votre plaie reste à l'entière appréciation de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Dans de très rares cas, des réactions locales d'hypersensibilité de type eczéma ont été observées. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ialuset® en cas d'hypersensibilité connue à l'acide hyaluronique ou à l'un des composants de ialuset® Crème et Compresse.

Si vous êtes enceinte ou allaitante, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ialuset®.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter les méthodes de nettoyage et de désinfection des plaies et de leur pourtour. Si nécessaire, un débridement du tissu nécrotique peut être effectué.
- L'utilisation de ialuset® sur une ulcération veineuse ne dispense aucunement du traitement compressif (bas ou bande).
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas avaler. À usage externe.



- Ne pas appliquer l'embout du tube ou du flacon pressurisé directement sur la plaie.
- *Crème en tube* : bien refermer le tube après chaque utilisation.
- *Crème en flacon pressurisé* : avant chaque utilisation éliminer la crème présente à l'extrémité du diffuseur.
- *Compresse stérile à usage unique* : (Stérilisée aux rayons Gamma) : ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Rapportez les produits périmés ou non utilisés à votre pharmacien qui se chargera de leur élimination.

ialuset® est un dispositif médical. Ne pas utiliser pour un usage cosmétique.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

Ce dispositif médical doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

À utiliser dans les 6 mois après ouverture (tube et flacon).

Année d'apposition du marquage CE : 1999.

Date de révision de la notice : Octobre 2021.

CE
0344

 IBSA Pharma SAS - Parc de Sophia-Antipolis - Les 3 Moulins
280, rue de Goa - 06600 - ANTIBES – France



Attention - Consulter les précautions d'emploi



Limite supérieure de Température



Ne pas réutiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation



Numéro de lot



À usage unique - Ne pas réutiliser
Seules les compresses imprégnées stériles sont à usage unique



Date limite d'utilisation



Dispositif Médical



Fabricant



Système de barrière stérile unique avec emballage de protection extérieur
Stérilisation par irradiation
Seules les compresses imprégnées sont stériles



Consulter les instructions d'utilisation



LE TRI
+ FACILE

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICE



Séparez les éléments avant de trier